


ZSI 100 FTM

PROTEZA PRĄCIA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE

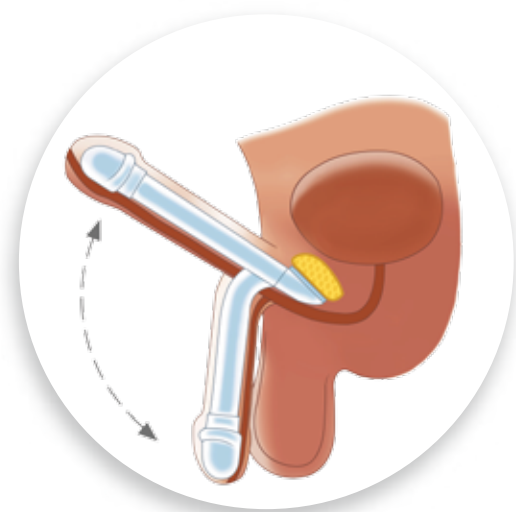

Rozwiązanie dla Falloplastyki

- dla pacjentów FTM
- więcej informacji na: www.zsimplants.ch
www.medicosystems.pl

ZEPHYR Surgical Implants posiada ISO 13485 : 2004
Proteza prącia o zmiennym kształcie ZSI 100 FTM posiada certyfikat CE.

Dystrybutor w Polsce

MEDICO SYSTEMS
ul. Droga Męczenników Majdanka 119
20-325 Lublin, tel. 81 710 40 00
e-mail: med@medicosystems.pl
www.medicosystems.pl

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland



ZSI 100 FTM PROTEZA PRĄCIA O ZMIENNYM KSZTAŁCIE

STWORZONA BY ZAPEWNIĆ ZNAKOMITĄ
STABILNOŚĆ I EFEKT KOSMETYCZNY

CZĘŚĆ DYSTALNA

Regulacja długości przez nacięcia co 5 mm.



CZĘŚĆ CENTRALNA

Cylinder o średnicy 22 mm.
Zapewnia komfort i realistyczny wygląd.


Wkład wewnętrzny:
łatwy do kształtowania.




CZĘŚĆ PROKSYMALNA

Płytką 30 mm na 25 mm.

Mocowana na trwałe do kości łonowej za pomocą 6 zaczipów.

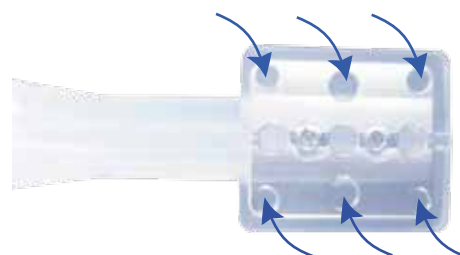

**DŁUGOŚĆ OD 16 cm DO 13 cm (Z WKŁADEM)
(DO 10 cm BEZ WKŁADU)**

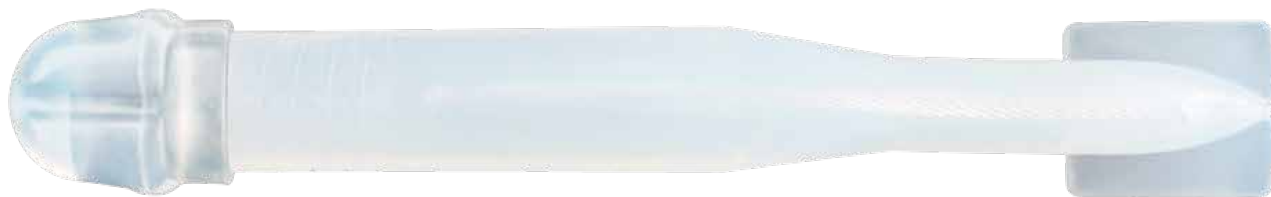

Końcówka protezy w kształcie realistycznej żołądki o średnicy 25 mm

Mocowanie wykonane ze stali nierdzewnej i silikonu

* Dla bardzo małej falloplastyki (poniżej 13 cm), srebrny wkład może być usunięty przez nacięcia silikonu.




Proteza jest na trwałe mocowana do kości łonowej



Działanie

ZSI 100 FTM z wkładem

Za pomocą jednej ręki chwyć implant u jego podstawy, układając palce po obu stronach cylindra. Drugą ręką wyprostuj implant.

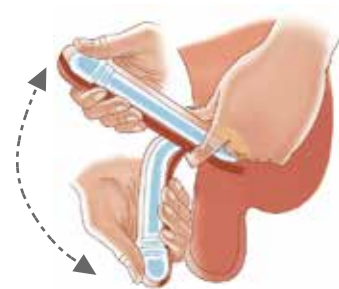

ZSI 100 FTM krótka (bez wkładu)

