


ZSI 375 PF

SZTUCZNY ZWIERACZ CEWKI MOCZOWEJ

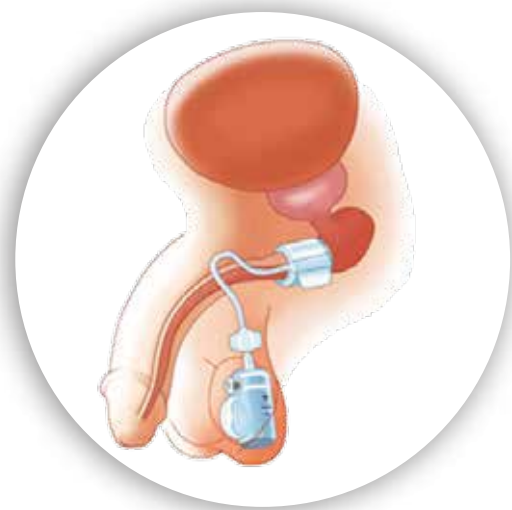

Rozwiązanie problemu ciężkiego nietrzymania moczu u mężczyzn

- regulowany mankiet: uniwersalny rozmiar
- więcej informacji na: www.zsimplants.ch
www.medicosystems.pl
www.zwieracze.pl

ZEPHYR Surgical Implants posiada ISO 13485 : 2004
Sztuczny zwieracz cewki moczowej ZSI 375 PF posiada certyfikat CE.


Dystrybutor w Polsce

MEDICO SYSTEMS
ul. Droga Męczenników Majdanka 119
20-325 Lublin, tel. 81 710 40 00
e-mail: med@medicosystems.pl
www.medicosystems.pl

ZSI (Zephyr Surgical Implant Sàrl)
C/Ulmann, route des Jeunes 4bis
1227 Les Acacias - Switzerland



REGULOWANY MANKIET OD 3.75 DO 5 cm

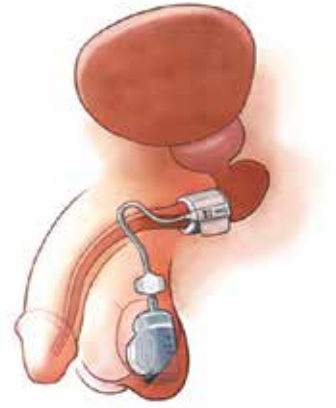

- 1 ZSI 375 PF
- 2 STRZYKAWKA 5 ML
- 3 IGŁA TYPU HUBER

1 ZWIERACZ JEST AKTYWOWANY KIEDY PRZYCIŚK (▼) WYSTAJE PO STRONIE POMPKI



2 PRZEGRODA ZBIORNIKA WYRÓWNAWCZEGO

3 ZBIORNIK REGULUJĄCY CIŚNIENIE

4 PRZYCIŚK POMPKI DO OPRÓŻNIANIA MANKIETU (NACIŚNIJ-PUŚĆ)



5 ZWIERACZ JEST DEZAKTYWOWANY KIEDY PRZYCIŚK (▼) WYSTAJE PO PRZECIWNEJ STRONIE NIŻ PRZYCIŚK POMPKI



6 POMPKA

7 SKRZYDEŁKA DO PRZYSZYCIA ZWIERACZA ZSI 375 PF DO WEWNĘTRZNEJ TKANKI MOSZNY



8 REGULOWANY MANKIET OD 3,75 DO 5 CM W KSZTAŁCIE OPASKI



9 PRZEGRODA UKŁADU HYDRAULICZNEGO

WYKONAJ ZDJĘCIE RTG MOSZNY ABY SPRAWDZIĆ POZYCJĘ SPRĘŻYNY



Sprężyna jest w pełni ściśnięta. Znajduje się poniżej górnej krawędzi cylindra.
Zwieracz ZSI 375 PF jest dezaktywowany.



Sprężyna jest w prawidłowej pozycji. Znajduje się na wysokości górnej krawędzi cylindra.
Zwieracz ZSI 375 PF jest aktywowany.



Sprężyna jest zupełnie rozprężona. W układzie hydraulicznym jest zbyt mało płynu.

MOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA WYTWARZANEGO CIŚNIENIA



DZIAŁANIE

