


DZIAŁANIE PROTEZY PRĄCIA ZSI 100

Giętkość protezy prącia ZSI 100 zapewnia łatwość jej użycia. Gdy chcesz osiągnąć erekcję, wyprostuj protezę i w ciągu kilku sekund jesteś gotowy do aktywności seksualnej. Proteza prącia ZSI 100 może pozostać w stanie erekcji tak długo, jak tego potrzebuje pacjent. Pacjent może kontynuować stosunek seksualny nawet po osiągnięciu orgazmu, jeśli tego chce. Jeśli partnerzy są usatysfakcjonowani, proteza prącia ZSI 100 może zostać z powrotem zgięta do pozycji wiotkiej.

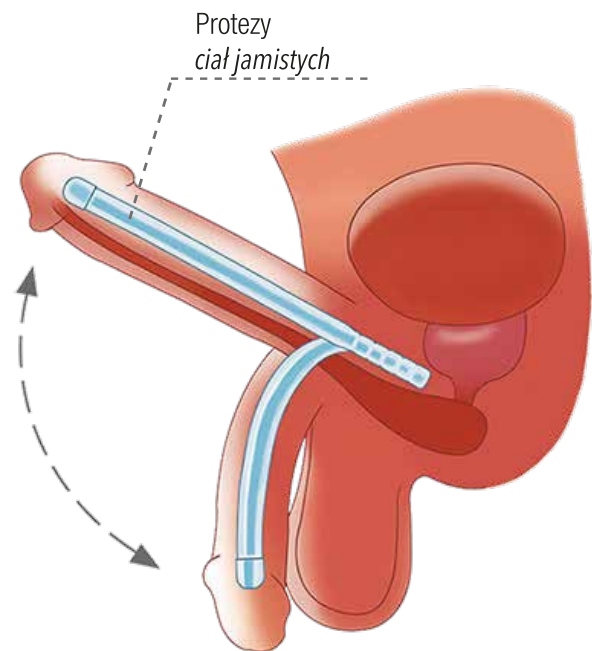

DZIAŁANIE PROTEZY PRĄCIA ZSI 100



1. Penis jest wiotki



2. Użyj dłoni by wyprostować penisa do pozycji erekcyjnej




3. Penis w erekcji



4. Po stosunku zegnij penisa do pozycji wiotkiej

ZEPHYR Surgical implants posiada ISO 13485 : 2004

Proteza prącia o zmiennym kształcie ZSI 100 posiada certyfikat CE.  Szwajcarska Jakość

DYSTRYBUTOR W POLSCE

MEDICO SYSTEMS S.C.
ul. Droga Męczenników Majdanka 119
20-325 Lublin
tel. 81 710 40 00
e-mail: med@medicosystems.pl
www.medicosystems.pl



PROTEZA PRĄCIA ZSI 100
Informacja dla pacjenta



www.zsimplants.ch
www.medicosystems.pl

WSTĘP

Proteza prącia ZSI 100 została zaprojektowana jako proste rozwiązanie do leczenia impotencji. Implant składa się z 2 giętkich cylindrów wszczepianych wewnątrz penisa. Erekcja jest osiągalna w łatwy sposób, poprzez wyprostowanie obu cylindrów w penisie. Proteza prącia ZSI 100 nie wpływa na zachowanie naturalnej wrażliwości żołądździ.




ANATOMIA

Męski penis składa się z 3 części: *żołądździ*, *ciał jamistych* i cewki moczowej otoczonej *ciałem gąbczastym*.

Żołądź lub inaczej główka penisa, jest najbardziej wrażliwym obszarem penisa. *Ciała jamiste* wypełniają się krwią, wywołując erekcję. Cewka moczowa otoczona *ciałem gąbczastym* stanowi część układu moczowego.

Ciała jamiste składają się z dwóch cylindrycznych korytarzy zlokalizowanych po obu stronach cewki moczowej. Mają zarówno zdolność do gromadzenia, jak i opróżniania się z krwi, co zapewnia zdolność do erekcji, jak i powrót do stanu wiotkiego. Zaburzenia erekcji powstają wtedy, gdy *ciała jamiste* nie są w stanie napęcznieć się krwią.

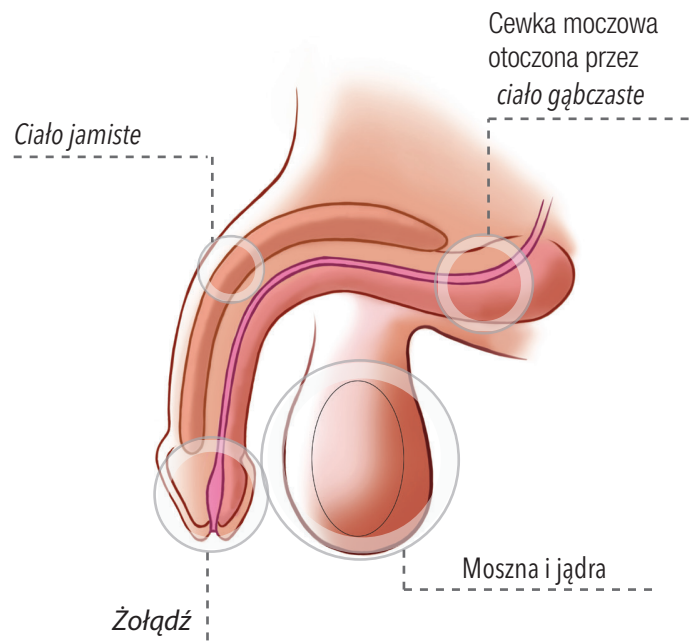

PROTEZA PRĄCIA ZSI 100

Proteza prącia ZSI 100 jest wyrobem medycznym, który w łatwy sposób rozwiązuje problem impotencji. Proteza prącia ZSI 100 składa się z dwóch mocnych, ale giętkich cylindrów, którymi można łatwo manipulować. Proteza jest wszczepiana do prącia, stanowi efektywne i dyskretne rozwiązanie impotencji.

Cylindry protezy prącia ZSI 100 są wszczepiane do ciał jamistych po obu stronach penisa. Aby wprowadzić cylindry, nie ma potrzeby usuwania żadnej tkanki. Protezy są wszczepiane w miejsca, gdzie do tej pory wpływała krew wywołując erekcję prącia. Proteza prącia ZSI 100 w żaden sposób nie wpływa na zdolność pacjenta do oddawania moczu czy wytrysku. Implant nie wpływa na zachowanie naturalnej wrażliwości zarówno penisa jak i żołądździ.

